

Lettre-circulaire : **93483** du 16 juillet 1993.

Objet : Sécurité d'utilisation des seringues BD perfusion 50 ml de BECTON DICKINSON est association avec des pousse-seringues.

Il s'est relevé que le modèle de seringues BD PERFUSION 50 ml (CAT n° 30.0080) fabriqué par la société BECTON DICKINSON avait reçu des modifications successives, en matière de caractéristiques dimensionnelles, sans pour autant que sa désignation commerciale ait été modifiée et que les utilisateurs en aient été avisés

L'utilisation des modèles modifiés sur des pousse-seringues réglés en fonction du modèle d'origine (notamment les pousse-seringues PROGRAM 1 et de VIAL) peut provoquer pour ces pousse-seringues, l'anomalie de fonctionnement suivante :

- Non déclenchement de la pré-alarme et de l'alarme de fin de perfusion pour le PROGRAM 1 et 2 fabriqués avant 1992. Dans ce cas, une alarme d'occlusion informera que la seringue est vide, mais dans un délai variable qui sera d'autant plus long que la vitesse d'avancée du poussoir du pousse-seringues sera faible.

Les conséquences qui peuvent en résulter pour les patients dépendent évidemment de la nature des médicaments injectés et de la pathologie traitée.

Il est conseillé aux détenteurs/utilisateurs des autres marques de pousse-seringues utilisant les seringues BD PERFUSION 50ml, d'effectuer les tests nécessaires pour les éventuelles anomalies de fonctionnement en résultant pour leurs appareils. En cas de découverte d'anomalies comparables à celle indiquées plus haut pour les PROGRAM 1 et 2, il conviendra d'en informer la Direction des Hôpitaux (Bureau EM1).

La société Becton Diskinson s'est engagée à informer et mettre en garde les détenteurs/utilisateurs de ces seringues, et à étudier avec eux, au cas par cas, une action adapté à leurs besoins.

Il est demandé à tous les détenteurs/utilisateurs qui n'auraient pas encore été informés par la société BECTON DICKINSON, de contacter celle-ci à son service commercial (tél. : 01.76.67.10.14 ou 01.76.67.10.03) afin que les mesures correctives les plus adaptées soient définies et mises en œuvre le plus rapidement possible.

REMARQUE IMPORTANTE

D'autres marques de seringues sont susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques dimensionnelles que les BD PERFUSION 50ml et d'avoir suivi leur évolution

en vue de rester substituables (les fournisseurs de ces seringues préconisent généralement d'utiliser les positions BD PERFUSION ou BRAUN PERFUSOR des pousse-seringues).

Un liste précise ne peut évidemment pas en être dressée.

Pour ces autre marques de seringues, les recommandations de ce télex demeurent pertinentes : il convient donc, le cas échéant de rentrer en contact avec leurs fournisseurs.

Pour tout renseignement complémentaire contacter le Ministère de la Santé - Direction des Hôpitaux - bureau EM1, tél 01 40 56 40 25.

Pour le Ministère et par délégation

Pour le Directeur des Hôpitaux

et par délégation,

Le Chef de Service

Pierre GAUTHIER

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.
Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication sur papier de la Direction des Hôpitaux.

<http://www.hosmat.fr>