



12 juillet 2002

Alerte sur les respirateurs Servo Ventilateur 300 (SV300) et 900 (SV900) de la société SIEMENS

Alerte n° : DM 02 / C 05

L'utilisation de la technique d'aspiration bronchique en circuit étanche au cours de la ventilation artificielle avec les respirateurs de type Servo Ventilateur 300 et 900 peut entraîner une détérioration des transducteurs de pression de ceux-ci et de fait, un risque pour la sécurité des patients. En conséquence, une alerte est diffusée par le système Viafax aux établissements de santé.

Tous les appareils utilisés avec des systèmes d'aspiration bronchique en circuit étanche doivent être équipés de nouveaux capteurs de pression. Pour toute information complémentaire, contacter le Centre d'Appel et d'Assistance Technique National au **08 20 32 44 90**.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>