

Le Pont de Claix, le 24 février 2005

Ref : RAEU 0148

Rappel de Lot
Aiguilles BD Vacutainer® PrecisionGlide™ réf 360213
Un numéro de lot concerné : 4260545

Cher client,

Vous avez récemment reçu des aiguilles BD Vacutainer® PrecisionGlide™ **réf 360213 – n° de lot 4260545 (péréemption 09/2009)**.

Un nombre restreint d'aiguilles de ce lot sont non conformes par rapport à nos spécifications de fabrication de part l'absence de lubrification de l'aiguille perce-bouchon. Les performances de l'aiguille de veine ne sont pas remises en cause.

Pour ces aiguilles le manchon peut rester en position rétractée après le retrait du tube du corps de prélèvement et ainsi entraîner une fuite avec risque potentiel de contact avec le sang du patient pour le personnel soignant.

Nous vous demandons donc, en accord avec l'AFSSAPS, de bien vouloir isoler de votre stock toute unité de ce lot, et de compléter le coupon réponse ci-dessous puis de le faxer au 04.76.68.35.91. A réception, notre service client prendra contact avec vous dans les meilleurs délais afin d'organiser la reprise de ces produits et leur remplacement.

Nous regrettons sincèrement les désagréments provoqués par la mise en place de cette mesure et nous vous prions de croire que la qualité de nos produits et l'entière satisfaction de nos clients sont notre priorité.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions d'agréer, cher client, nos salutations distinguées.

Pascal SIRCOULOMB
Directeur de Division
BD Diagnostics – Preanalytical Systems

Merci de compléter le coupon réponse et de le faxer au 04.76.68.35.91 (téléchargé via : www.materiovigilance.org)
afin de nous confirmer que vous avez pris connaissance du Rappel de lot - Aiguilles Vacutainer® PrecisionGlide™ (Ref courrier RAEU0148). Si tous les produits de ce lot ont été utilisés, indiquer « 0 » dans la case « Quantité à reprendre ».

Etablissement :		Nom :			
Adresse :		Fonction :			
		Date :			
		Signature :			
Quantité reçue : (n° lot 4260545 uniquement)		Quantité à reprendre: (n° lot 4260545 uniquement)		Quantité reprise: A remplir par BD	