

Attention : Directeurs des établissements de santé
Correspondants locaux de réactovigilance
Responsables de laboratoires

Le Pont de Claix, le 30 mai 2005

Rappel de Lot

Tube BD Vacutainer® en verre avec citrate – vide de 4.5ml – Référence 367704

Un numéro de lot concerné : 5005913

Madame, Monsieur,

BD a récemment identifié que le lot cité ci-dessus ne s'inscrit pas dans le cadre de nos spécifications produits. Deux signalements ont mis en évidence que quelques tubes pourraient contenir une quantité de citrate trop importante (2 ou 3 fois la dose correcte) qui risquerait, si ces tubes étaient utilisés, de modifier le ratio sang/anticoagulant et d'entraîner des résultats d'analyse incorrects. La dilution causée par une dose trop importante de citrate peut entraîner un allongement des temps de coagulation et une diminution de concentration des marqueurs de coagulation.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons de ne pas utiliser ces tubes. Nous vous demandons de vérifier si des tubes de ce lot sont encore présents dans vos stocks, de bien vouloir remplir le formulaire ci-après et de nous le faxer au 04 76 68 35 91. A réception de ce document renseigné, notre service clients prendra contact avec vous afin d'organiser la reprise et le remplacement des tubes concernés.

Nous vous prions de croire que la sécurité et le bien-être du patient et du personnel de santé ainsi que la qualité irréprochable de nos produits constituent pour nous une priorité incontournable. Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous accordez à la société BD.

Notre équipe de vente est à votre disposition, merci de bien vouloir contacter nos collaborateurs pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

P. SIRCOULOMB
Directeur Division
BD Diagnostics – Preanalytical Systems

Merci de compléter le coupon réponse et de le faxer au 04.76.68.35.91 afin de nous confirmer que vous avez pris connaissance du Rappel de lot - Tube BD Vacutainer® en verre avec citrate – vide de 4.5ml – Référence 367704 - numéro de lot concerné : 5005913. Si tous les produits de ce lot ont été utilisés, indiquer « 0 » dans la case « Quantité à reprendre ».(téléchargé via : www.reactovigilance.com)

Etablissement :		Nom :			
Adresse :		Fonction :			
		Date :			
		Signature :			
Quantité reçue : (n° lot 5005913 uniquement)		Quantité à reprendre: (n° lot 5005913 uniquement)		Quantité reprise: A remplir par BD	